


Рекомендації щодо застосування CHIRAVAC Голка для вакуумного забору крові

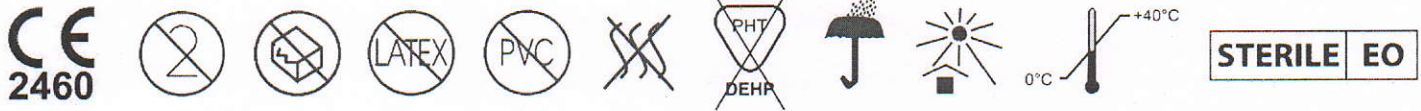


Опис: CHIRAVAC Голка для вакуумного забору крові, одноразового використання. Стерильна, нетоксична, апірогенна.

Область застосування: CHIRAVAC Голка для вакуумного забору крові призначені для повсякденного забору крові навченим персоналом. Вони призначені для одноразового використання і повинні використовуватися із дотриманням цієї інструкції кваліфікованим медичним персоналом. Пацієнтами можуть бути як дорослі, так і діти.

-  1. Перед використанням перевірте термін дії стерильності, комплектність упаковки, серійний номер і термін придатності;
2. Голки повинні бути використані відразу після відкриття індивідуальної упаковки і повинні стати недоступними для подальшого застосування після використання;
3. Якщо індивідуальна упаковка пошкоджена або ж термін дії вже закінчився, використання продукту не дозволяється;
4. Застосовувати продукт має право лише кваліфікований лікар, або медичний працівник;
5. Лише для одноразового використання. Після використання голку необхідно утилізувати;
6. Даний виріб не містить фталати DEHP;
7. Повторна стерилізація або ж повторне використання можуть викликати інфекцію або ж взаємну перехресну дію.

-  1. Перед використанням перевірте цілісність кожної індивідуальної пакування. Якщо упаковка пошкоджена, не використовуйте її;
2. Перед використанням, відкрийте індивідуальне пакування голки;
3. Кожна використана голка вважається зараженою і відразу після її використання повинна бути ліквідована в належний контейнер;
4. Після одного використання ліквідуйте (утилізуйте) її безпечним способом, щоб уникнути ризику зараження;
5. Тримайте руки позаду вістря голки протягом усього часу використання та утилізації.

Процедура взяття венозної крові за допомогою вакуумної системи:

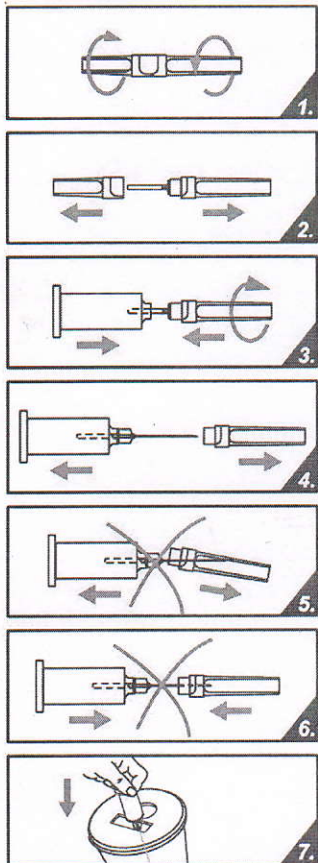

- 1) Поверніть і зніміть ковпачок на футлярі голки.
ВАЖЛИВО: Наявність непошкодженої етикетки на футлярі голки вказує на те, що ця продукція стерильна і раніше не використовувалася. Якщо етикетка надірвана, пошкоджена - голку необхідно утилізувати і взяти нову голку з непошкодженою етикеткою. (Мал.1-2)
- 2) Вставте голку в вертикальному положенні в тримач. Переконайтеся, що голка щільно вставлена в тримач.
ВАЖЛИВО: Якщо ви вставите голку в тримач не під вертикальним кутом, голка буде «рухомою» при введенні в вену. (Мал.3)
- 3) Визначте місце для проколу. Використовуйте джгут (максимум до 1 хвилини). Обробіть область для проколу дез. засобом.
НЕ ПЕРЕВІРЯЙТЕ МІСЦЕ для проколу ГОЛИМИ РУКАМИ після дезінфекції.
- 4) Тримайте руку пацієнта перпендикулярно. Зніміть ковпачок з голки. (Мал.4-5)
- 5) Вставте пробірку всередину тримача і переконайтеся, що голка щільно проходить через гумову кришку, не пропускає і не втрачає вакуум.
- 6) **ЯК ТІЛЬКИ ПОЧНЕ ПОСТУПАТИ КРОВ** в пробірку, послабте ДЖГУТ. Уникайте КОНТАКТУ КРОВІ З КРИШКОЮ ПРОБІРКИ і з ЗАКІНЧЕННЯМ ГОЛКИ.
В жодному разі не рухайте пробіркою вниз або верх під час забору крові. Завжди натискайте на пробірку ззаду великим пальцем, поки вона не заповниться кров'ю.
ВАЖЛИВО: Гумова частина у виїняткових випадках може протікати. Тому зведіть до мінімуму ризику зараження.
- 7) Щоб продовжити забір крові, використовуйте лише нові пробірки. Уникайте контакту крові з кришкою пробірки.
- 8) Щойно забір крові завершено, видаліть голку з вени, прикладіть вату, доки кровотеча не зупиниться.
- 9) Для зменшення кровотечі можете використовувати самоклеючий пластр.
ВАЖЛИВО: Після завершення забору крові, на пробірці можуть залишитися сліди крові. Вживайте всіх заходів обережності, щоб не доторкатися до них.
- 10) Утилізуйте голку і тримувач в спеціальний контейнер для забору гострих предметів. Не намагайтеся знову одягнути ковпачок на голку, це збільшує ризик уколу. (Мал.6-7)

-  Засторога!
-  Озн. з інструкцією для застосування
- REF:** Номер за каталогом
-  Повторно викор. ЗАБОРОНЕНО
- LOT** Код партії
-  Дата виготовлення
-  Використати до / Термін придатності
- STERILE EO** Стерилізація оксидом етилену
-  Виробник
-  Довгий скіс
-  Короткий скіс
-  Не містить DEHP
-  Не містить PVC
-  Не містить латекс
-  Не використовувати, якщо пакування пошкоджено
-  Апірогенно
-  Обережати від дії прямого сонячного проміння
-  Температурне обмеження
-  Не залишайте під дощем

CHIRANA T. Injecta, a.s.
Nám. Dr. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
Slovak Republic
Tel.: +421/32/7709 991
Fax.: +421/32/7709 956
www.t-injecta.com



Уповноважений представник в Україні / служба споживачів:
Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕРКУРІЙ ВЕСТ»
79057, Україна, м.Львів, вул. Антоновича, 128
Тел./факс: +38 (032) 244-244-0 www.medservis.com.ua